

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ МНОГОРАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка специальной дезинфицирующей жидкостью сразу после использования, то есть после каждого клиента.

01



ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА

Иногда этот этап может быть совмещен с первым, ведь современные дезинфекционные жидкости эффективно очищают и от мелких частиц кожи/крови, и от вирусов. Но обязательно должно быть активное механическое или ручное очищение инструментов после этапа дезинфекции.

02



СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Для этого этапа используется сухожар (воздушный стерилизатор) или компактный паровой стерилизатор, автоклав и так далее. Инструменты необходимо запечатать в одноразовый крафт-пакет и поместить в стерилизатор. Режим стерилизации определяется инструкцией по применению оборудования для стерилизации и подбирается оптимально для инструментов. За это время все вредоносные микроорганизмы будут уничтожены.

03



04

ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Стерильные инструменты могут храниться в закрытом крафт-пакете, срок хранения зависит от материала пакета, он указан в инструкции по применению. Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде, только если их хранение происходит в определенных условиях, и они будут использованы в течение 6 часов. Также возможно хранение в УФ-шкафах, но не более 7 суток.

